

Система имплантации Accuject™ Pro




LUXSMART™



LUXGOOD™

Инструкция по подготовке имплантации инжектора Accuject Pro с с ИОП Luxsmart™ и LuxGood™

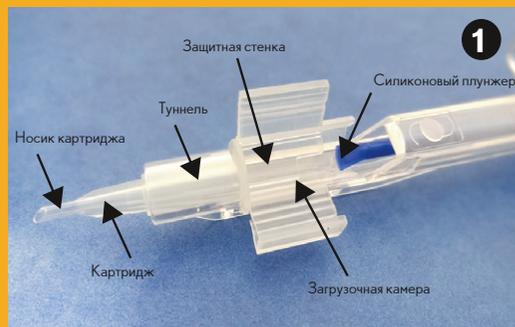


Accuject Pro полностью предзагруженная система имплантации шприцевого типа. ИОП LuxSmart, раствор БСС* и вискоэластик должны находиться при температуре не ниже 20С в течении 30 минут до имплантации



Откройте блистер и перенесите инжектор в стерильное поле.



Увлажните ИОП с помощью введения раствора БСС в носик картриджа

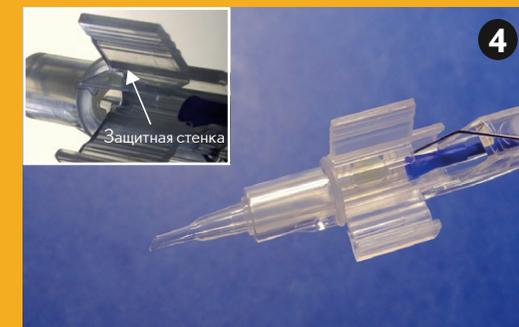

Затем промойте линзу с обратной стороны картриджа, расположив канюлю рядом с силиконовым наконечником под защитной стенкой. Картридж и загрузочная камера содержат покрытие, которое активируется при гидратации. Полное увлажнение всех частей является обязательным.



Введите вискоэластик** в носик картриджа до красной линии




Подождите 30 секунд



Закройте "крылья" загрузочной камеры до щелчка. Система готова для имплантации (не продвигайте ИОП в туннель в настоящее время). Передайте инжектор хирургу.



ПЕРЕДИМПЛАНТАЦИЕЙ

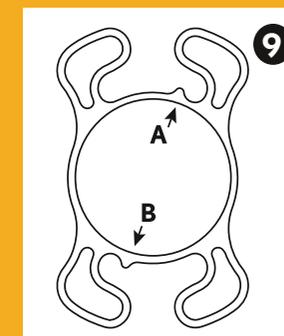

Сразу после имплантации необходимо проверить правильность расположения ориентационных меток: вверх справа (А) и вниз слева (В)

*БСС - Сбалансированный солевой раствор
**Амвиск Плюс, ОкуКоат